

Impella CP™ mit SmartAssist™ Herzpumpe – 9. Generation

Sichere Positionierung. Vereinfachte Vorbereitung.

Die Impella™ Herzpumpe ist eine intravaskuläre Mikroaxial-Blutpumpe zur Unterstützung des Kreislaufsystems des Patienten.

Hämodynamische Unterstützung

- Mittlerer Durchfluss von 3,7 L/min


Sichere Positionierung

- Ermöglicht durch den optischen Sensor und die Software zur Früherkennung einer Fehlpositionierung*
- Klare, präzise Alarme zur Fehlerbehebung

Vereinfachte Vorbereitung

- Reduzierung der Vorbereitungsschritte, da die Repositionierungseinheit auf dem Katheter bereits zurückgeschoben ist; kein Zurückziehen während der Einführung erforderlich

*Nur für Alarm „Impella Position im Ventrikel“

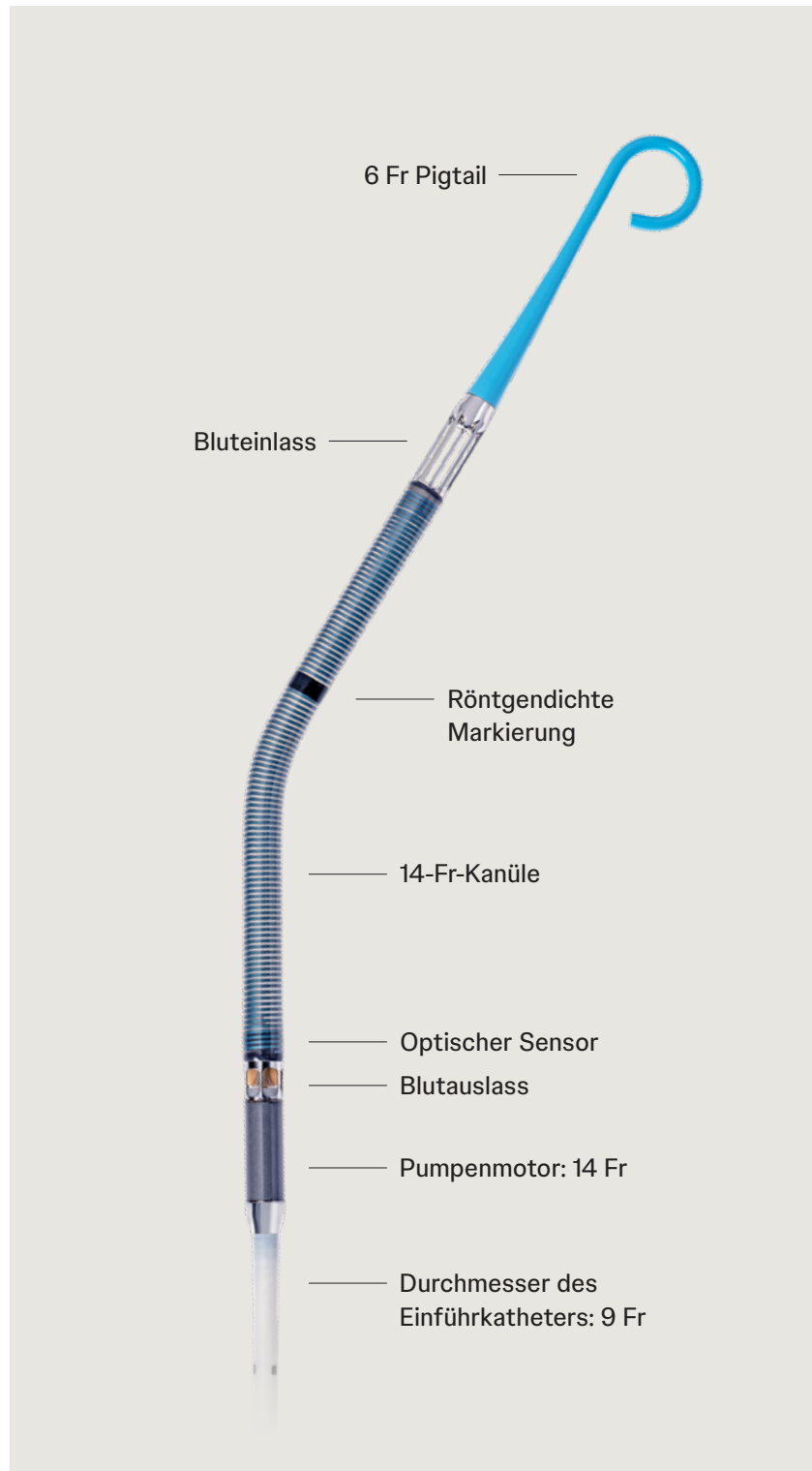



Impella CP™ mit SmartAssist-Set

Artikelnummer: 0048-0014

- Impella™ Katheter
Artikelnummer: 1000185 (1 Stück), 1000200 (5 Stück)
- Purgekassette
Artikelnummer: 0052-3025
- Einführschleusenkit
Artikelnummer: 0052-3005



Automatischer Impella™ Controller

Artikelnummer: 0042-0010-EU

Artikelnummer: 0042-0040-EU (mit Impella Connect)

- Der Controller bietet eine Schnittstelle zur Überwachung und Steuerung der Funktion aller Impella™ Katheter. 10,4 Zoll Farbbildschirm für einfache Ablesbarkeit
- Montage am Controller-Wagen (nicht dargestellt) für den Transport im Krankenhaus möglich
- 60 Minuten Akkulaufzeit für mobilen Transport



Einführschleusenkit

Artikelnummer: 0052-3025

- Kit für den Gefäßzugang zur perkutanen Einführung des Impella™ Katheters.
- Zwei Peel-Away-Einführschleusen mit 14 Fr Durchmesser (13 cm und 25 cm Länge) – mit hämostatischem Ventil für eine genaue Passform um Komponenten herum und einer in einem einzigen Schritt spaltbaren Konfiguration
- Führungsdraht (0,035 Zoll, 150 cm)



Platzierungsführungsdraht, 0,018 Zoll x 260 cm

Führungsdraht mit röntgendichter, formbarer Spitze zur Positionierung des Impella™ Katheters im linken Ventrikel.

Artikelnummer: 0052-3005



Purgekassette

Artikelnummer: 1000185 (1 Stück), 1000200 (5 Stück)

Die Purgekassette leitet Spülflüssigkeit zum Impella™ Katheter. Die Spülflüssigkeit fließt von der Purgekassette durch den Katheter zur mikroaxialen Blutpumpe, um zu verhindern, dass Blut in den Motor gelangt.



Impella CP mit SmartAssist + 7-Fr-Companion Schleuse als Bündel

Artikelnummer: 4000110

Kompatibel mit 7 Fr Companion Schleuse für Single-Access-Verfahren. Verbessert das Single-Access-Verfahren von Abiomed. Einfaches Einsetzen und Entfernen durch die Impella Einführschleusen (14 Fr).

Impella™ Systemindikation und Sicherheitsinformationen

Weitere Informationen über die Impella Herzpumpen, einschließlich wichtiger Risiko- und Sicherheitshinweise im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Systeme, finden Sie unter <https://www.heartrecovery.eu/safety-information>

- oder -



Scannen Sie den Code, um mehr zu erfahren.